



複模型用シリコン印象材

# ピュア シリコン

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料  
一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000096

## ピュア シリコン

練和もしやすく、適度な流動性を  
持ち細部の流し込みも容易に操作  
できます。

色 調 : A 剤 (白)

B 剤 (青)

容 量 : A 剤 1 kg + B 剤 1 kg / 箱



標準価格 ¥12,000



作業可能時間	5 ~ 6 分
硬化時間	3 0 分
ショア A 硬度 (60 分後)	2 4
寸法変化	-0.05%

※自社、試験によるもの(温度 約 23°C の条件下)  
※作業環境(温度)により硬化時間が大きく影響しますので十分に硬化  
していることを確認後に脱型して下さい。

### 【使用方法】

1. B 剤、A 剤の順に 1 対 1 の割合で均一になるまで手早く練和します。(約 1 分)
2. 空気を巻き込まないように十分注意して型に流し込みます。
3. 室温で硬化させ、型から外して下さい。

※使用の注意、保管方法は添付文書をご確認下さい。

### ●取扱店

## 株式会社 クエスト

〒475-0946  
愛知県半田市横山町157-1  
電話 0569 (27) 7017  
FAX 0569 (27) 5998  
<http://www.quest-pure.com>

※表示価格は税抜きです

2014.01 版