

Quest  
—明日の人工歯を考える—



第2弾

維持孔付人工歯シリーズ [第2弾]

# NEW Retention Hole **RH plus** 新登場!!

硬質レジン歯



Dr.クエスト

歯科医、  
歯科技工士の  
皆様からのお声を  
反映した次世代の  
維持孔付き硬質  
レジン歯が  
誕生しました。

その1 義歯床へ強固に  
固定できる独自のカタチ!!

従来のT字貫通孔にスリット形状も  
加え義歯床へしっかり固定、  
脱落を予防します。



その3 技工作業を  
さらに軽減・短縮!!

脱落防止の穴へのエアは不要、  
義歯の品質向上と  
時間短縮を両立します。



その2 樹脂が深部まで  
入りやすくなった独自の設計!!

エアイベント (空気穴) とスリットを設けたことにより、  
粘性の高い義歯床用材料も人工歯の深部まで  
入り込みやすくなりました。

**BABA!!! Ohhhhhhh!!!**

維持孔付人工歯シリーズ

リテンションホール  
**Rh plus**

…って、なに?



「RHプラス」は、お客様の声を形にした  
クエストからの新しい提案です。

「お客様の声から生まれた…」

床用樹脂の種類により人工歯との結合力が異なり、義歯製作時の人工歯脱落問題が  
クローズアップされています。クエストは、第1弾 (平成20年秋) の提案として  
T字貫通維持孔付人工歯RH (リテンションホール) を発売、ご愛顧を頂いております。  
今更なます、射出系の樹脂が増える中、お客様のニーズ (手間の短縮・機能性アップ) に  
応えた第2弾「RHプラス」を発売することとなりました。

「RHプラス」のコンセプト

plus 1

「RHプラス」は、各種樹脂の詰まりを良くする為、  
前歯維持部分においては空気残りを防ぐエアイベントを取り入れ、  
臼歯部においてはスリットを設けるなど、  
維持部分のボリュームアップを図りました。  
また、近遠心・舌側スリット (アンダーカットなど) を設けることによって、  
床用樹脂との接着面積を増やし、脱落防止をサポートしました。

plus 2


維持孔を加工する手間を省き、人工歯排列・削合時の調整による  
維持 (孔・溝) 残存率も考慮した形状となっております。

「RHプラス」は技工作業の簡略化に貢献します。

上下フルデンチャー28歯あたり約12分の時間短縮! (1歯あたりの維持 (孔・溝) 付時間25秒として)

(例) 6床排列した場合は、約36分短縮!

12床排列した場合は、約72分短縮!

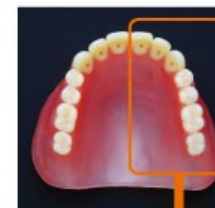

(上) RHプラスを採用して製作  
(下) 貫通孔の樹脂拡大写真



維持孔の形状設計図

用途に合わせて選べる。  
単品補充用から  
全形態セットまで。



|                          |         |         |                           |              |         |
|--------------------------|---------|---------|---------------------------|--------------|---------|
| ① ハードレジンA前歯用 RHプラス 6歯組   | 20個/箱   | 17,200円 | ④ ハードレジンA前歯用 RHプラス 固定型セット | 16個位×10箱/セット | 22,800円 |
| ② ハードレジンA臼歯用 RHプラス 6歯組   | 14個/箱   | 18,100円 | ⑤ ハードレジンA前歯用 RHプラス 単品補充用  | 20個/箱        | 2,000円  |
| ③ ハードレジンA前歯用 RHプラス 全形セット | 32個/セット | 27,800円 | ⑥ ハードレジンA臼歯用 RHプラス 単品補充用  | 20個/箱        | 2,000円  |

前歯色調: A2-A3-A3.5 前歯: NS-NT-NC-NSS 犬歯: I1-I2-I3-I4-臼歯 (色調: A2-A3-A3.5 犬歯: I28-I30-I32)  
樹脂の種類: ハードレジンA前歯用 硬質樹脂: 2014年10月20日現在 ハードレジンA臼歯用 硬質樹脂: 2014年10月20日現在  
注意事項: (1) ユニパック50個入りは、ご注文下さい。(2) 採用レジンの購入・射出方法はメーカーの表示に準じてご利用下さい。(3) 維持孔部分の削りやすさにご注意ください。

「ハードレジンRHプラス」に関するお問い合わせ・資料請求はお気軽に。

株式会社クエスト

ISO 9001:2008  
ISO 13485:2003

〒475-0848 愛知県半田市横山町157-1番地  
URL <http://www.quest-pure.com>  
E-mail [info@quest-pure.com](mailto:info@quest-pure.com)

TEL (0569) 27-7017  
FAX (0569) 27-5998